

สรุปขั้นตอนการส่งสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาจากผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อ COVID-19

ประเภทสิ่งส่งตรวจ

ชิ้นเนื้อ
ที่ใส่ขวด



1. นำเนื้อใส่ขวดที่มี 10%NFB ติดชื่อ HN. ปิดฝาให้สนิท พันรอบปากขวดด้วยพาราฟินฟิล์ม ติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard"



2. นำใส่ถุงพลาสติก 3 ชั้น มัดให้แน่นที่ละชั้น



3. นำใส่กล่องพลาสติกที่ติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard"



4. นำส่งหน่วยพยาธิวินิจฉัยทันที พร้อมใบส่งตรวจที่ติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard"

ชิ้นเนื้อ
ที่ใส่ถุง




1. นำชิ้นเนื้อใส่ถุงที่มี 10%NFB มัดปากถุงให้แน่น ติดชื่อ HN. ติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard"



2. นำใส่ถุงพลาสติก 3 ชั้น มัดให้แน่นที่ละชั้น



3. นำใส่กล่องพลาสติกที่ติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard"

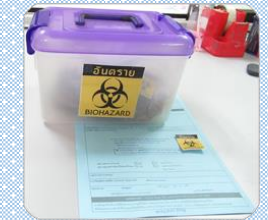

4. นำส่งหน่วยพยาธิวินิจฉัยทันที พร้อมใบส่งตรวจที่ติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard"

Fluid
Cytology



1. นำ fluid ใส่ขวด Sterile ปิดให้สนิท พันรอบปากขวดด้วยพาราฟินฟิล์ม "Biohazard"



2. นำใส่ถุงพลาสติก 3 ชั้น มัดให้แน่นที่ละชั้น



3. นำใส่กล่องพลาสติกที่ติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard"



4. นำส่งหน่วยพยาธิวินิจฉัยทันที พร้อมใบส่งตรวจที่ติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard"

Smear
Slide



1. นำสไลด์ที่ระบุชื่อ HN. ผู้ป่วย ใส่ขวดที่บรรจุ 95% alcohol ปิดฝาให้สนิท "Biohazard"



2. ติดฉลากระบุข้อมูลผู้ป่วย และติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard" ที่ข้างขวด



3. นำใส่กล่องพลาสติกที่ติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard"



4. นำส่งหน่วยพยาธิวินิจฉัยทันที พร้อมใบส่งตรวจที่ติดสติ๊กเกอร์ "Biohazard"

หมายเหตุ งดรับตรวจ ชิ้นเนื้อสด, Frozen section, Body fluid ในรายที่ติดเชื้อ Covid-19, Immunofluorescence ในรายที่ติดเชื้อ Covid-19, Autopsy ในรายที่ติดเชื้อ Covid-19

มีข้อสงสัยติดต่อที่ หน่วยพยาธิวินิจฉัย ภาควิชาพยาธิวิทยา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055965326 ในวัน และเวลาราชการ